



Jakelu:

Oulun, Kempeleen, Haukiputaan, Kiimingin ja Tyrnävän terveyskeskusten laboratoriot
Muut PPSHP:n alueen terveyskeskusten laboratoriot
OYS:n erityisvastuualueen keskussairaaloiden laboratoriot

MUUTOS GLUKOOSINÄYTTEIDEN SÄILYVYYDESSÄ

OYS:n laboratorio on muuttanut glukoosinäytteiden säilyvyysohjeistusta koskien **fP-Gluk (n:o 1468)** ja **P -Gluk (n:o 1471)** tutkimuksia. Fluoridisitraattiputkeen (FC-putki) otetun näytteen säilyvyyttä sentrifugoimattomana on pidennetty 24 tuntiin sekä huoneenlämmössä että jääkaappilämpötilassa. Muutos perustuu putkivalmistajan suosituksiin.

Uusittu ohjekirjan teksti (fP-Gluk ja P -Gluk):

NÄYTE: Laskimoverta 2 ml fluoridisitraattivakuumi-putkeen (FC-mixture), sekoitetaan kääntämällä putki ylösalaisin 12-15 kertaa. **Näyte säilyy 24 t huoneenlämmössä ja jääkaapissa. Muuhun kuin FC-putkeen otettu näyte on sentrifugoitava tunnin kuluessa näytteenotosta.** Erotettu plasma säilyy huoneenlämmössä 2 vrk, jääkaapissa viikon ja pakastettuna kuukausia.

LÄHETYS: Kokoverinäyte (FC-putki) 24 t kuluessa tai muutoin erotettu plasma huoneenlämpöisenä mikäli perillä 2 vrk kuluessa, muutoin kylmälähetyksenä.

Tiedusteluihin vastaavat

Osastonhoitaja Kaisi Kaila, puh. 08-315 4434 ja kemisti Katri Puukka, puh. 08-315 5972.
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ppshp.fi.

OYS:n päivystyslaboratorion vastaava lääkäri,
apulaisylilääkäri

Virva Huotari